

# MIRÉN

ДЕРМАЛЬНИЙ ФІЛЛЕР ГК 24 МГ/МЛ



## Precise Lift Natural Look Long-Lasting Love

MIRÉN – це лінійка філлерів із зв'язаною гіалуроновою кислотою, розроблена для ідеального поєднання в'язкоеластичності, безпеки та передбачуваних результатів. Філлер MIRÉN представлений у трьох видах: Soft, Mid та Hard – що дозволяє лікарю спробувати продукт під кожну зону обличчя.

## 3 види рішень Під будь-яке питання



### MIRÉN Soft

Для корекції дрібних зморшок, контуру губ та деликатних зон



### MIRÉN Mid

Для носогубних складок, області щік та зморшок середньої глибини




### MIRÉN Hard

Для глибокого відновлення об'єму: лінії щелепи, підборіддя, структурного ліфтингу.

## Механізм дії

Стабілізована гіалуронова кислота (1500 кДа)  
забезпечує тривале зволоження та відновлення об'єму

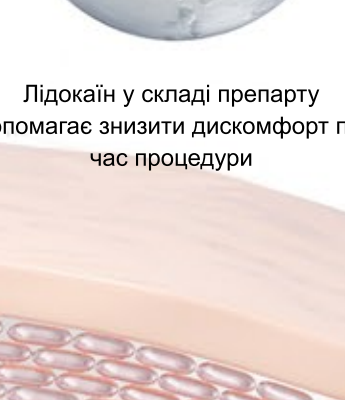

Лідокаїн у складі препарату допомагає знизити дискомфорт під час процедури

Завдяки технології зшивання препарат зберігає форму та забезпечує надійну підтримку м'яких тканин



Стабілізована гіалуронова кислота (1500 кДа)

Вводиться в певні шари дерми для відновлення втраченого об'єму, покращення контурів обличчя та розгладжування

## Клінічні переваги



### ПЕРЕВАГА 1

Оптимальна текстура сприяє рівномірному та контрольованому розподіленню препарату

### ПЕРЕВАГА 2

Високоочищена гіалуронова кислота з мінімальним вмістом BDDE

### ПЕРЕВАГА 3

Природний та довготривалий результат – до 12 місяців

### ПЕРЕВАГА 4

Три типи щільності для точної роботи по зонах обличчя

### ПЕРЕВАГА 5

Мінімальна набряклість та швидка реабілітація завдяки оптимальній формулі

## Покази до застосування та очікуваний результат



### Soft

#### Зони застосування

Контур губ та дрібні зморшки

#### Глибина ведення

Поверхневі та середні шари дерми

#### Тривалість результату

6-9 місяців

#### Лідокаїн

0,3%

#### Рівень в'язкості

◆◆◆  
Низький

### Mid

#### Зони застосування

Носогубні складки

#### Глибина ведення

Середні та глибокі шари дерми

#### Тривалість результату

9-12 місяців

#### Лідокаїн

0,3%

#### Рівень в'язкості

◆◆◆  
Середній

### Hard

#### Зони застосування

Підборіддя, лінія щелепи

#### Глибина ведення

Глибокі шари дерми або підшкірна клітковина

#### Тривалість результату

До 18 місяців

#### Лідокаїн

0,3%

#### Рівень в'язкості

◆◆◆  
Високий

#### ◆ Рекомендований протокол введення

Шприц	Попередньо наповнений шприц 1.0 мл
Голка	Soft: 27G 13мм, Mid: 25G 13мм, Hard: 25G 13мм
Техніка введення	Техніки введення: лінійна, віялова – підбираються в залежності від зони корекції та типу препарату
Тривалість	Результат зберігається на 9-18 місяців (в залежності від метаболізму пацієнта та зони введення)

#### ◆ Безпека та рекомендації щодо застосування

- Стерильний та апірогенний препарат
- Введення має виконувати лише кваліфікований спеціаліст
- Перед процедурою потрібно продезінфікувати шкіру та оцінити її стан
- Перед процедурою лікарю рекомендовано провести консультацію та уточнити можливі алергічні реакції.

#### ◆ Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів препарату
- Активні запальні процеси або можливі шкірні інфекції у зоні введення
- Аутоімунні захворювання або схильність до утворення келоїдів
- Вагітність та період лактації

#### ◆ Запобіжні заходи

- Не рекомендується завдавати сильного тиску або масажувати зону ін'єкції після процедури
- Рекомендується утриматись від алкоголю, відвіданя сауни та інтенсивних фізичних навантажень протягом 48 годин після процедури
- Не допускається змішування препарату із іншими ін'єкційними продуктами в одному шприці
- Процедура має проводитись лише спеціалістами, які знають анатомію, аби уникнути внутрішньосудинного введення

#### ◆ Специфікації

Назва продукту	MIRÉN
Пакування	Попередньо наповнений шприц 1.0 мл в коробці
Зберігання	Зберігати при кімнатній температурі (1-30 °C) у місці захищеному від прямих сонячних променів та замерзання.
Строк придатності	24 місяці із дати виготовлення. Дата закінчення строку придатності вказана на пакуванні.
Застосування	див. інструкцію із застосування
Склад	Зшити гіалурована кислота (24 мг/мл), лідокаїна гідрохлорид (0,3%), фосфатно-соляний буфер

Офіційний представник в Україні  
ТОВ Естетична Гуртівня  
Київ, вул.Євгена Коновальця 44А оф.192  
info@aesthetichnagurtivnya.com.ua  
+38 073 265 85 38



MIRÉN