

PiNkLLA

Протокол

- Ключові складники бустера шкіри PiNkLLA : #Полі-L-молочна кислота (PLLA) #Полінуклеотид(PN) #ВІТАМІН С #ГЛУТАТІОН #Гіалуронова кислота

Ключові функції бустера шкіри PiNkLLa: регенерація, шліфування, депігментація. ВІТАМІН С та ГЛУТАТІОН мають потужну відбілювальну дію, однак легко деградують і втрачають дієвість. Завдяки технології CIB, бустер шкіри PiNkLLa долає цю проблему.

[Вказівки з підготовки]

1. Змішайте PiNkLLa (100 мг) з стерильним фізрочином (до 6 мл)
2. Легенько потрусіть флакон рукою (1 хв.), залиште на 1-2 хв. (до зникнення бульбашок).
3. Готово

In-label техніка

- Нанести на шкіру обличчя, тіла /шкіру голови і використати під апаратну методику

Важливо: PiNkLLa слід використати протягом 8 годин після відкриття флакону. Суміш слід зберігати в холодильнику.

Off-label техніка

- Папульне введення (зони обличчя, шиї, руки, очі, зона лоба та міжбрів'я, тіло.

Важливо: від ока відступаємо 1 см.

[Термін придатності]

- Бустер можна використовувати до дати, зазначеної на продукті. Зберігайте бустер за кімнатної температури, проте якщо в при міщенні висока температура або є ризик впливу сонячного світла, краще тримати бустер у темному прохолодному місці.

АНТИСЕПТИЧНІ ЗАХОДИ

- Дотримуйтеся місцевих правил дезінфекції, однак подбайте, аби перед процедурою на поверхні шкіри не залишилося будь-яких сторонніх речовин.

ЕТАПИ КУРСУ ПРОЦЕДУР

ПЕРШИЙ ЕТАП

3 сеанси з інтервалом 2 тижні. Сеанс можна повторювати раз на 6 місяців.

[Розклад сеансів]

