

ПРОТОКОЛ

MIXO Light Plus

Дермальний філер з лідокаїном

СКЛАД

Гіалуронова кислота – 20 мг/мл, Лідокаїн - 3 мг/мл

ФОРМА ВИПУСКУ

Шприц 1,1 мл + 2 голки 30G

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при кімнатній температурі при температурі до 25°C , не заморожувати.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Термін придатності дивитись на упаковці. Не використовувати після кінцевої дати, вказаної на упаковці.

ВИРОБНИК

DermaKor CO., Ltd. (Південна Корея)

ОПИС

Стерильний прозорий гель у шприці. Філери MIXO на основі високомолекулярної гіалуронової кислоти нетваринного походження. MIXO - це монофазний філер у складі має мікрогранули стабілізованої гіалуронової кислоти з використанням сучасної технології DMCT. Завдяки цій технології збільшується кількість поперечних зв'язків, та знижує рівень ендотоксину, який викликає алергічні реакції та побічні ефекти.

Завдяки високій в'язкопружності і когезивності філери МІХО тривалий час підтримують необхідний об'єм, не мігрують і не деформуються в тканинах під впливом міміки. Висока зшивка гіалуронової кислоти дозволяє продлити ефект від 9 до 12 місяців. Філер самостійно біорозкладається та виводиться організмом. Дермальні філери МІХО мають оптимальний рівень рН 5.5-8.5, це робить процедуру комфортною для пацієнта і клієнта. Лідокаїн у складі філерів МІХО виконую знеболювальну дію при введенні та в після процедурний період. Гель має м'яку структуру, легко приймає потрібну форму і об'єм. Філери мають сертифікацію ЕС, а також пройшли сертифікацію на території України.

ДІЯ

- Підвищення пружності шкіри
- Вирівнювання рельєфу
- Усунення зморшок і складок
- Заповнення втраченого об'єму

ПОКАЗАННЯ

- Зморшки на лобі та міжбрів'я
- Мімічні зморшки навколо очей
- Дрібні зморшки навколо роту
- Периорбітальні зморшки

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Підвищена чутливість до гіалуронової кислоти
- Вагітність та період лактації
- Онкологічні новоутворення
- Забороняється проводити процедуру пацієнтам, які не досягли 18 річчя
- Гострі запальні процеси
- Пошкодження шкіри в місцях ін'єкцій
- Схильність до формування келоїдних рубців
- Порушення згортання крові
- Епілепсій

ТЕХНІКИ

Класична

ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ

Корекція глибоких нерівностей шкірного профілю: носогубні складки, періоральні зморшки, зморшки на щоках, маріонеткові лінії; збільшення об'єму і корекція контурів губ.

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ

Переконайтесь, що упаковка та флакон немає пошкоджень та відповідає заявленим характеристикам. Провести демакіаж, обробити поверхню розчином хлоргексидину, після закінчення процедури повторити обробку зони ін'єктування. Введення філеру проводиться в середній шар дерми голкою 30G на глибину 2.5-3 мм.

ТРИВАЛІСТЬ

6-9 місяців

КУРС ПРОЦЕДУР

1 раз в 6-9 місяців