

ПРОТОКОЛ

# MIXO Light

Дермальний філер з лідокаїном

## СКЛАД

Гіалуронова кислота – 20 мг/мл, Лідокаїн - 3 мг/мл

## ФОРМА ВИПУСКУ

Шприц 1,1 мл + 2 голки 30G

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при кімнатній температурі при температурі до 25°C , не заморожувати.

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Термін придатності дивитись на упаковці. Не використовувати після кінцевої дати, вказаної на упаковці.

## ВИРОБНИК

Dermakor CO., Ltd. (Південна Корея)

## ОПИС

Стерильний прозорий гель у шприці. Філери MIXO на основі високомолекулярної гіалуронової кислоти нетваринного походження. MIXO - це монофазний філер у складі має мікрогранули стабілізованої гіалуронової кислоти з використанням сучасної технології DMCT. Завдяки цій технології збільшується кількість поперечних зв'язків, та знижує рівень ендотоксину, який викликає алергічні реакції та побічні ефекти.

Завдяки високій в'язкопружності і когезивності філери МІХО тривалий час підтримують необхідний об'єм, не мігрують і не деформуються в тканинах під впливом міміки. Висока зшивка гіалуронової кислоти дозволяє продлити ефект від 9 до 12 місяців. Філер самостійно біорозкладається та виводиться організмом. Дермальні філери МІХО мають оптимальний рівень рН 5.5-8.5, це робить процедуру комфортною для пацієнта і клієнта. Лідокаїн у складі філерів МІХО виконую знеболювальну дію при введенні та в після процедурний період. Гель має м'яку структуру, легко приймає потрібну форму і об'єм. Філери мають сертифікацію ЕС, а також пройшли сертифікацію на території України.

## **ДІЯ**

- Підвищення пружності шкіри
- Вирівнювання рельєфу
- Усунення зморшок і складок
- Заповнення втраченого об'єму

## **ПОКАЗАННЯ**

- Зморшки на лобі та міжбрів'я
- Мімічні зморшки навколо очей
- Дрібні зморшки навколо роту
- Периорбітальні зморшки

## **ПРОТИПОКАЗАННЯ**

- Підвищена чутливість до гіалуронової кислоти
- Вагітність та період лактації
- Онкологічні новоутворення
- Забороняється проводити процедуру пацієнтам, які не досягли 18 річчя
- Гострі запальні процеси
- Пошкодження шкіри в місцях ін'єкцій
- Схильність до формування келоїдних рубців
- Порушення згортання крові
- Епілепсій

## **ТЕХНІКИ**

Класична

## **ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ**

Корекція глибоких нерівностей шкірного профілю: носогубні складки, періоральні зморшки, зморшки на щоках, маріонеткові лінії; збільшення об'єму і корекція контурів губ.

## **ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ**

Переконайтесь, що упаковка та флакон немає пошкоджень та відповідає заявленим характеристикам. Провести демакіаж, обробити поверхню розчином хлоргексидину, після закінчення процедури повторити обробку зони ін'єктування. Введення філеру проводиться в середній шар дерми голкою 30G на глибину 2.5-3 мм.

## **ТРИВАЛІСТЬ**

6-9 місяців

**КУРС ПРОЦЕДУР**

1 раз в 6-9 місяців