

## **ПРОТОКОЛ**

### **Tesoro**

філер для тіла на основі гіалуронової кислоти

#### **СКЛАД**

Гіалуронова кислота – 20 мг/мл

#### **ФОРМА ВИПУСКУ**

Флакон 60 мл

#### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати при кімнатній температурі при температурі до 30°C , не заморожувати.

#### **ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**

36 місяців з дати виготовлення (дивитись на упаковці). Не використовувати після кінцевої дати, вказаної на упаковці

#### **ВИРОБНИК**

Koru Pharmaceuticals Co., Ltd.(Південна Корея)

#### **ПЕРЕВАГИ**

- Продукт безпечний і повністю виводиться організмом
- Більш тривалий ефект порівняно з продуктами на основі мономерної гіалуронової кислоти
- Сліди ін'єкцій практично непомітні навіть відразу після процедури
- Висока якість і чистота продукту досягається застосуванням новітніх біотехнологічних методів
- Висока когезивність та в'язкість

## **ДІЯ**

- Безопераційна корекція форми та розміру грудей
- Збільшення об'єму сідниць
- Корекція форми ніг
- Відновлення м'яких тканин після ліпосакції

## **ПОКАЗАННЯ**

- Провисання та дряблість шкіри
- Зниження еластичності шкіри
- Асиметрія сідниць, грудей чи ніг

## **ПРОТИПОКАЗАННЯ**

- Підвищена чутливість до компонентів препарату
- Вагітність та період лактації
- Онкологічні новоутворення
- Забороняється проводити процедуру пацієнтам, які не досягли 18 річчя
- Гострі запальні процеси
- Пошкодження шкіри в місцях ін'єкцій
- Схильність до формування келоїдних рубців
- Порушення згортання крові
- Епілепсій
- Цукровий діабет

## **ТЕХНІКИ**

Тіло (груди, сідниці, стегна)

## **ЗОНИ ЗАСТОСУВАННЯ**

Долоні, обличчя, шия та зона декольте, тіло

## **ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРИ**

Процедура ін'єктування філера Tesoro Body HA Filler проводиться досвідченими лікарями в середньому протягом 30 хвилин. За допомогою тонкої канюлі гель вводиться глибоко в підшкірний шар під кутом 45 градусів. Проколи, які не перевищують 2-3 мм, зазвичай робляться у зоні корекції, таких як лінії згину під грудьми або сідницями.

Один з головних переваг Tesoro Body HA Filler полягає у використанні місцевої анестезії під час процедури, що забезпечує комфорт пацієнта. Також варто зазначити, що цей метод корекції форми залишає можливість грудного вигодовування в майбутньому, що робить його особливо зручним для багатьох жінок.

Для ін'єкцій гелю Tesoro Body HA Filler рекомендується використовувати канюлю з тупим кінчиком розміром 16G або 18G. Також можна використовувати канюлі розміром 19G-21G. Важливо, щоб канюля була стерильною, щоб забезпечити безпеку та надійність процедури.

## **ТРИВАЛІСТЬ**

12-15 місяців

## **КУРС ПРОЦЕДУР**

Курс повторити 1 раз в 2 роки для підтримки ефекту.